



# Vcheck

# cPL

## Lipase Pancreática Específica Canina



### CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

- Mensuração direta da concentração de cPL.
- Comece agora a medir a Lipase pancreática do cão em seu hospital!

### FAIXA DE REFERÊNCIA: (Faixa de Mensuração 50 - 2000 ng / ml)

**NORMAL** ≤200 ng/ml

**SUSPEITO** 200-400 ng/ml

**ANORMAL** 400-2000 ng/ml



VOLUME DE AMOSTRA

Resultado = < 200ng / mL: Probabilidade muito baixa de pancreatite.


Resultado > = 400ng / mL: probabilidade muito alta de pancreatite.

200ng / mL < o resultado < 400ng / mL

1. Repetir o teste em 2 semanas, se o animal apresentar sintomas.
2. Se não houver sintomas, recomendamos repetir o teste um mês depois.

### PROCEDIMENTO EM 3 PASSOS:

**1.** Obtenha 25µL de soro usando uma pipeta capilar de volume fixo.

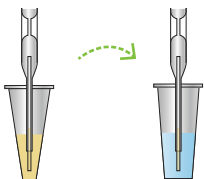

**2.** Usando uma pipeta capilar, misture bem.



**3.** Coloque a amostra no cassete.



**BIONOTE**

**eco**

DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO