

02 de junho de 2026,

Atualização de Equipamento Vcheck V200 Versão V1.00_R032

[Novo Recurso]

1. Recurso de diagnóstico de rede (V200)

1.1 Caminho de acesso: Administrador > Informações > Exibir versão > Clique no número de série 3 vezes > Teste de rede

2. Recurso de comunicação bidirecional

[Modificação]

1. Otimização da lógica de determinação de resultados SDMA 2.0

2. Aplicação de código de comunicação de impressora aprimorado → Maior estabilidade de impressão (V200)

Lembre-se que é imprescindível manter seu Vcheck V200 SEMPRE ATUALIZADO e que, após a atualização, será necessário realizar uma nova calibração.

PASSO A PASSO PARA ATUALIZAÇÃO:

1. Acesse o site <https://ecodiagnosticavet.com.br/animais-estimacao/atualizacao/> para download do arquivo de atualização.
2. Transfira o arquivo ".bin" baixado para um pendrive vazio formatado em FAT32. Se tiver feito download do arquivo compactado (.zip), faça a extração para obter somente o arquivo ".bin".
3. Insira o pendrive no Vcheck e verifique se ele foi reconhecido (um ícone aparecerá na tela do seu equipamento).
4. Acesse o menu ADMINISTRADOR (senha 0000).
5. Clique em ATUALIZAR -> ATUALIZAR SOFTWARE.

*Para ver o passo a passo detalhado assista o vídeo no link abaixo:

Vídeo demonstrativo: <https://youtu.be/FS0pbfjjaZ8>

(OBS: no vídeo acima, é mostrado o acesso ao site da linha humana para download do arquivo. Não há necessidade de seguir esse passo, seu arquivo já se encontra no link do tópico 1)